



Wyłącznie do użytku weterynaryjnego / Produkt do zastosowań profesjonalnych

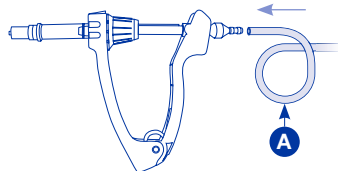

Jak zamocować wąż na strzykawce

Przyłączyć przewód (rys. A) z tylnej strony strzykawki.

lub

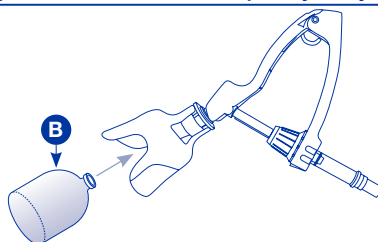


Jak zamocować butelkę na strzykawce

Zalecamy, by tę procedurę wykonać, trzymając strzykawkę w pozycji odwróconej.

- Umieścić butelkę (rys. B) na wprost igły, aby przekłuć gumowa zatyczkę w centralnym punkcie.

- Przekłuć i docisnąć, upewniając się, że nastąpiło słyszalne „klik”.


⚠ NIE ODWRACAĆ BUTELKI !

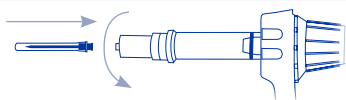

Jak wprowadzić igłę do zastrzyków podskórnych

- Nasadzić igłę na końcówkę Luer-Lock.

- Obrócić igłę o 90 stopni, aby umocować ją na końcówce.

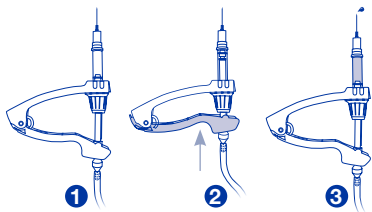

Jak przygotować strzykawkę


1 Ująć strzykawkę z igłą skierowaną do góry.

2 Aktywować uchwyty, aby rozpocząć napełnianie cylindra strzykawki.

3 Uwolnić powietrze z cylindra, wolno przyciskając uchwyty z igłą nadal skierowaną do góry.

Procedurę należy przeprowadzać ostrożnie w celu uniknięcia utraty jakiegokolwiek ilości preparatu płynnego.

Jeśli do dyspozycji jest wersja z uchwytem butelki, urządzenie InjectMaster należy umieścić w płaszczyźnie poziomej podczas zwalniania uchwytów, dzięki czemu ciecz przepłynie bezpośrednio do cylindra bez tworzenia pęcherzyków powietrza.

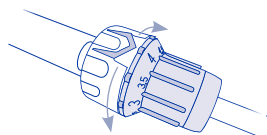

Dopasowanie dawki

Zastosować system „wybierz-dawkę”, obracając pokrętkę, i wybrać pożądaną dawkę.

⚠ PROCEDURĘ TĘ NALEŻY WYKONAĆ NIE WYWIERAJĄC NACISKU NA UCHWYTY !

Procedura wstrzykiwania

1 Nakłuć.

2 Wstrzyknąć.

3 Usunąć igłę z ciała zwierzęcia, nie zwalnając nacisku na uchwyty.

4 Ustawić igłę do góry.

5 Zwolnić uchwyt, aby zaciągnąć następną dawkę.

Powyższa procedura zapobiegnie niekompletnemu napełnieniu cylindra.

Czyszczenie strzykawki

Po usunięciu butelki, zanurzyć całkowicie w ciepłej wodzie i manipulować nią, by wypłukać przewód.

Sterylizacja

Strzykawkę można wysterylizować wrzątkiem.





Można również pozostawić w cylindrze antyseptyczny roztwór po płukaniu.

Konserwacja

Nie należy zapominać o regularnym smarowaniu uszczelki tłoka odpowiednim olejem silikonowym, co wymaga jedynie odkręcenia cylindra strzykawki.


Wyłącznie do użytku weterynaryjnego / Produkt do zastosowań profesjonalnych

Zawartość zestawu

- Sprężyna tylnego zaworu (nr ref. 109328) 
- Sprężyna przedniego zaworu (nr ref. 109325) 
- Zawory (nr ref. 186682 i 186681) 
- Nasadka (nr ref. 186683) 


Uszczelka, dołączana do urządzenia Injectmaster®

- Uszczelka cylindra 1 ml (nr ref. 186684)
- Uszczelka cylindra 2 ml (nr ref. 186680)
- Uszczelka cylindra 5 ml (nr ref. 186698)

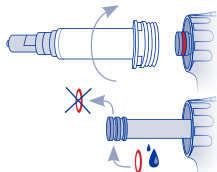


Wymiana uszczelki cylindra

- Odkręcić cylinder (ręcznie).
- Usunąć uszczelkę (przytrzymanie uchwytów może ułatwić wyjęcie uszczelki).
- Umieścić nową uszczelkę i nasmarować ją olejem silikonowym (nr ref. 106020).
- Przykręcić cylinder na urządzenie Injectmaster®.

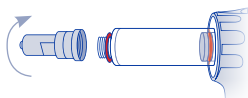


Wymiana przednich elementów urządzenia Injectmaster®

- Odkręcić jednoczęściową plastikową końcówkę (za pomocą klucza płaskiego otwartego 13) lub jednoczęściową metalową końcówkę (za pomocą klucza płaskiego otwartego 8).
- Nałożyć zawór (nr ref. 186682) na sprężynę (nr ref. 109325).
- Wprowadzić zawór i sprężynę do cylindra.
- Przykręcić końcówkę na cylinder za pomocą klucza płaskiego otwartego.

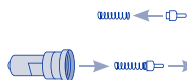


⚠️ LEKKO DOKRĘCIĆ KOŃCÓWKĘ NA CYLINDRZE

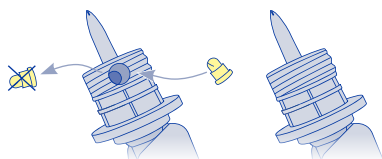

Wymiana tylnych elementów (wersja z mocowaną butelką)

Wymiana nasadki

- Odkręcić zabezpieczenie butelki.
- Usunąć nasadkę za pomocą cienkiego narzędzia (np. spinacza do papieru).
- Sprawdzić czy nasadka ma otwór na górze a następnie umieścić ją tak głęboko, jak można ją osadzić.

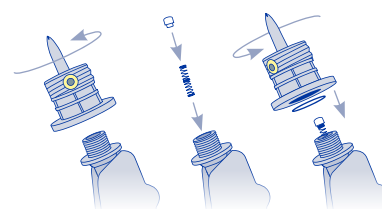


Wymiana tylnych elementów

- Odkręcić mocowanie tylnej butelki (za pomocą klucza płaskiego otwartego 19).
- Nałożyć zawór (nr ref. 186681) na sprężynę (nr ref. 109328).
- Wprowadzić zawór i sprężynę do mocowania tylnego zaworu.


⚠️ UPEWNIĆ SIĘ, ŻE PIERŚCIEN 13.5 (NR REF. 106192) ZNAJDUJE SIĘ WE WŁAŚCIWYM MIEJSCU A DO ZAWORU ZOSTAŁ ZACHOWANY DOSTĘP.

- Nakręcić mocowanie tylnej butelki z powrotem na przyrząd Injectmaster®.

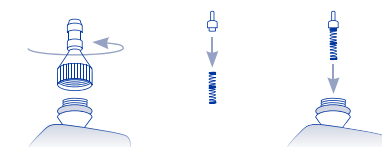

Wymiana tylnych elementów (wersja z przewodem)

- Odkręcić złącze przewodu (ręcznie).
- Nałożyć zawór (nr ref. 186682) na sprężynę (nr ref. 109328) a następnie wprowadzić zawór i sprężynę do złącza przewodu.
- Przykręcić złącze przewodu na urządzeniu Injectmaster®.

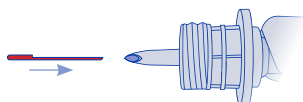

Postępowanie w trybie niewymagającym przygotowania

Po okresie niekorzystania, należy sprawdzić czy zawór nie uległ zatkanie. W tym celu, należy delikatnie manipulować zaworem u dołu igły przyrządu InjectMaster za pomocą patyczka.